

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Es el vehículo donde se colocan las materiales a usar en el procedimiento de curación de heridas y/o procedimientos a realizarse en la atención al paciente.

PROTOCOLO DE MANEJO DE COCHE DE CURACIONES

DIRIGIDO: A todo el Personal Asistencial que labora en Hospital.

DEFINICIÓN: Es el vehículo donde se colocan las materiales a usar en el procedimiento de curación de heridas y/o procedimientos a realizarse en la atención al paciente.

OBJETIVOS: Centralizar los materiales a usar en el procedimiento de curación la herida y/o procedimientos a realizarse en la atención al paciente.

MATERIALES: Características físicas del Coche de Curaciones:

- ✓ Con ruedas
- ✓ De material lavable.
- ✓ Con superficies planas
- ✓ Recipiente (balde, lavatorio, bolo, etc)

MATERIAL ESTÉRIL BÁSICO:

- ✓ Equipos de curación que contenga una pinza Kelly, 1 pinza disección con uña, tijera de mayo recta.
- ✓ Una bandeja ó riñonera u otra composición de acuerdo a las necesidades locales.
- ✓ Material de algodón, gasas y género (torundas, apósitos, vendas, campos).
- ✓ Material de goma (drenajes, guantes)
- ✓ Pinza portaobjeto
- ✓ Jeringas de 10 y 20 cc
- ✓ Soluciones antisépticas: Alcohol puro, Yodopovidona al 7.5% (espuma) y al 10% (solución), solución de Gluconato de Clorhexidina al 2%, bencina y Cloruro Sodio al 9%0

MATERIAL NO ESTÉRIL:

- ✓ Material de fijación (esparadrapo)
- ✓ Bolsas desechables.

PROCEDIMIENTOS:

- ✓ La limpieza del coche debe realizarse diariamente de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección.
- ✓ Los materiales e insumos estériles que contenga el coche deben ser abastecidos diariamente y cada vez que sea necesario.
- ✓ Los frascos de soluciones antisépticas, deben estar estériles, rotulados y bien tapados.
- ✓ La solución a cambiar (diariamente) debe realizarse en frasco estéril
- ✓ Las soluciones a verter, se hará a una distancia de 20 cm por encima de la zona elegida para curar y/o realizar procedimiento.
- ✓ La porta pinza y la pinza porta objeto, debe mantenerse en solución desinfectante
- ✓ Las torundas, gasa y apósitos deben estar preparados en paquetes, envueltos en papel crepado y rotulados con la cantidad de material y fecha de vencimiento

RECOMENDACIONES:

- ✓ El material sucio y/o contaminado debe eliminarse en el recipiente y nunca entrará en contacto con la zona estéril del coche de curaciones, el personal deberá contar con un tacho de residuos sólidos para biocontaminados independiente del carro y retirar el material usado al área sucia de la estación de enfermería, tan pronto termine la curación.
- ✓ Los frascos de soluciones deben ser oscuros, estériles y pequeños (de 30 a 60 cc)

“Mantener el coche de curaciones limpio y ordenado disminuye los riesgos de infección en nuestros pacientes”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: Mobiliario medico / Transporte de medicamentos para heridas.
- ✓ Modelo: CC-1C-SA
- ✓ Dimensiones: 88 (Alto) × 40 (Ancho) x 40 (Fondo) cm.
- ✓ Material: Fierro pintado.
- ✓ N.º de cajones: 1.
- ✓ Amoblado: No.
- ✓ Incluye llantas: Si.
- ✓ Incluye llaves: No.
- ✓ Peso aprox: 9 kg.
- ✓ Incluye insumos: No.
- ✓ Nombre comercial: Coche de curación.

