

CARACTERISTICAS GENERALES:

Este envase contiene dos cajas de 25 tiras Ruby para el lector glucémico MediSmart Ruby. Las tiras Ruby se utilizan con una muestra de sangre de la punta del dedo o de un lugar alternativo (el brazo, el muslo, etc.) extraída mediante las lancetas y el bolígrafo de punción. Las tiras Ruby, insertadas en el MediSmart Ruby, permiten medir la glucemia analizando la reacción entre la sangre y la tira.

Precauciones:

- ✓ Mantener alejado de la luz solar directo y el calor
- ✓ No congelar
- ✓ Almacenar a una temperatura de entre 2 y 30 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ **Uso Versátil:** Estas tiras reactivas permiten la medición de glucosa en sangre con muestras obtenidas de la punta del dedo o de lugares alternativos como el brazo o el muslo. Esto se logra mediante las lancetas y el bolígrafo de punción, lo que ofrece una mayor comodidad.

Modo de Empleo:

- ✓ Inserta una tira reactiva en tu lector glucémico MediSmart Ruby.
- ✓ Obtiene una pequeña muestra de sangre de la zona de elección.
- ✓ Aplica la muestra de sangre en la tira reactiva.
- ✓ Espera a que el lector realice la medición, la cual se basa en la reacción de la sangre con la tira.

